













간단사용설명서

Gmate[®] WHEEL

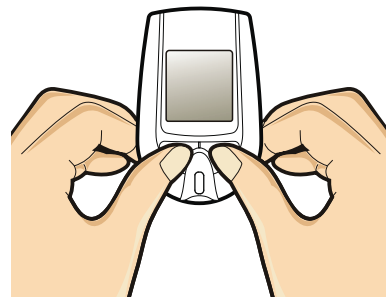

짧게 누르세요
설정 모드에서 다음 단계로 이동합니다.
동시에 누르면 전원이 꺼집니다.

3초 간 누르세요
설정 모드가 시작됩니다.
설정 모드가 종료됩니다.

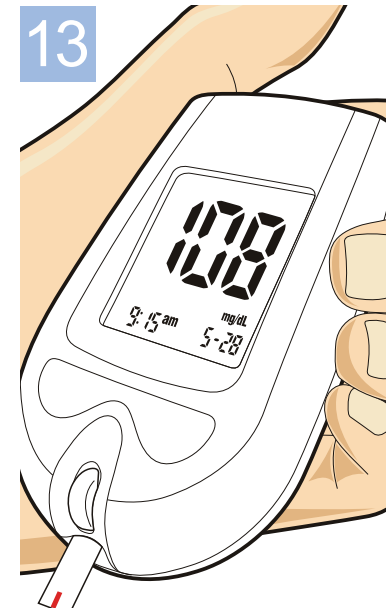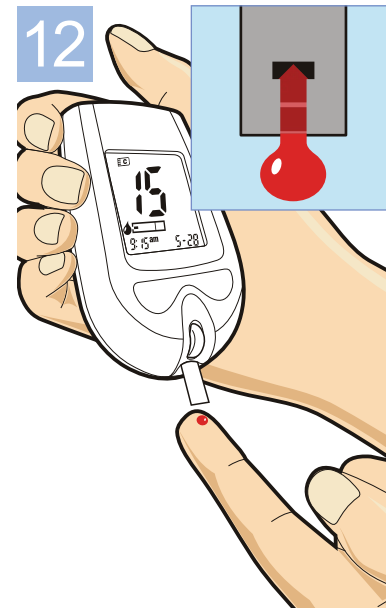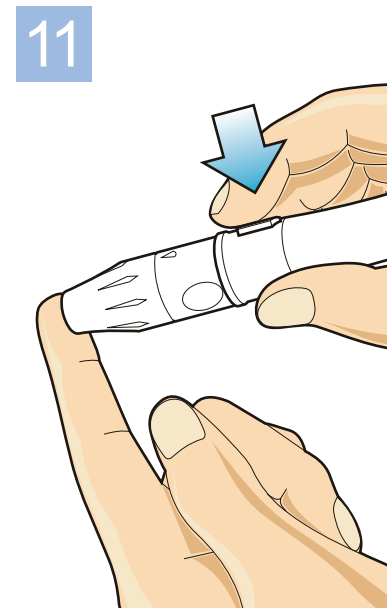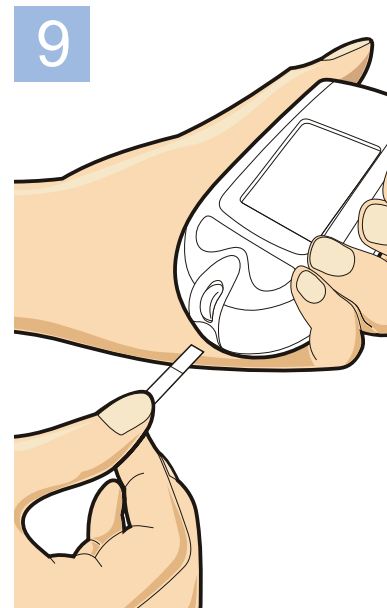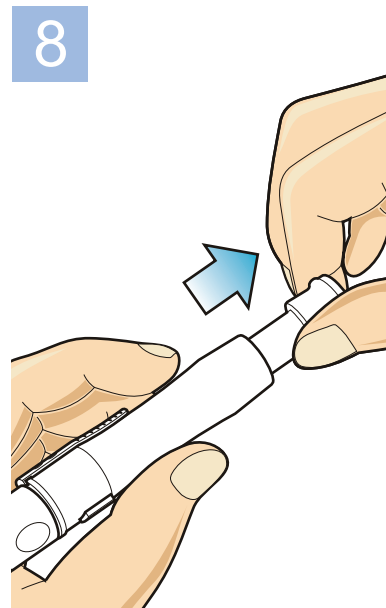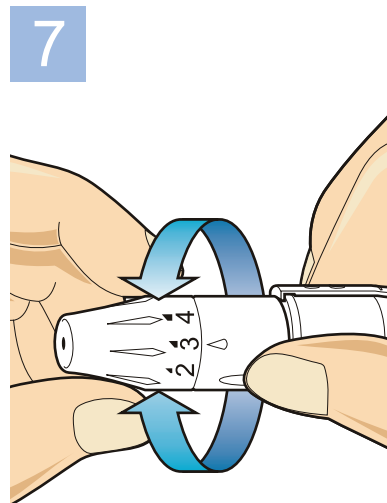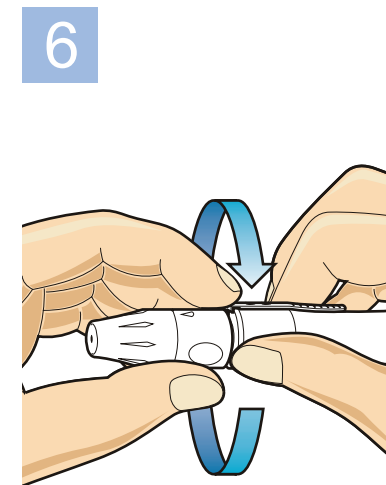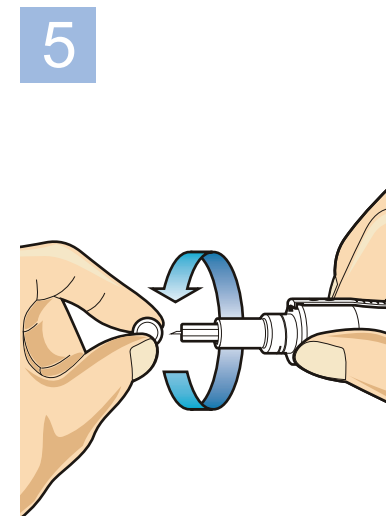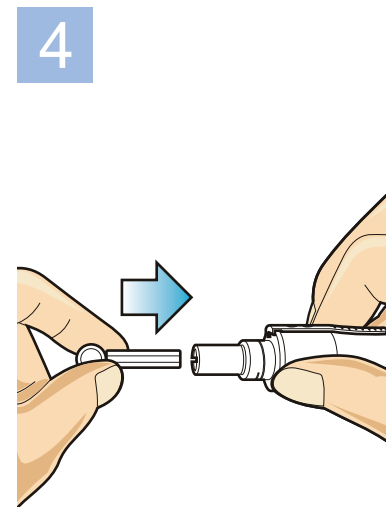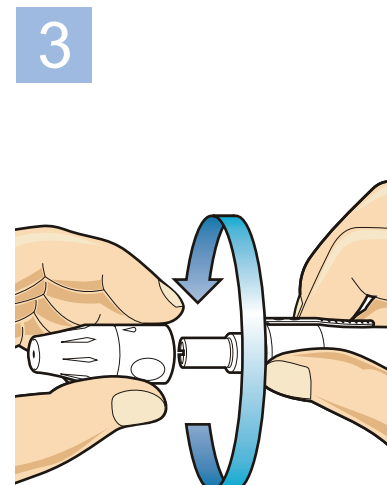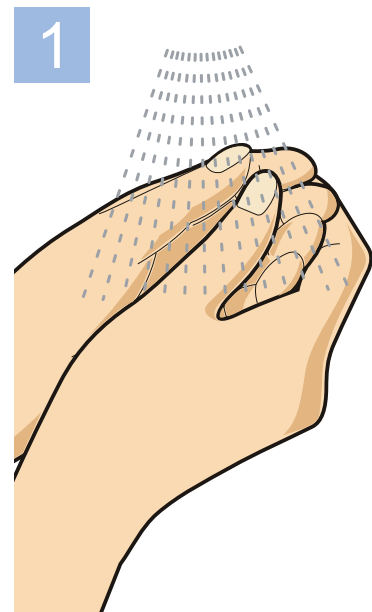

- E01 사용한 개인용혈당검사지 삽입 시
- E02 검사지의 인식에 문제가 생겼을 경우
- E03 기기에 이상이 있을 시
- E04 주위 온도가 시스템 작동 범위 (10~40°C)를 벗어날 시